

Eigenschaften und Funktionen, die den VARIANO einzigartig machen

Die besondere Funktionalität, Ergonomie und die aktivierenden Eigenschaften des VARIANO-Sessels entstanden in der inspirierenden und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Pflege- und Altersheimen sowie Kliniken und Spitälern. Somit ist der Sessel für verschiedenste Krankheitsbilder konzipiert und bietet umfangreiche Möglichkeiten für therapeutische und pflegerische Anwendungen.

Geringes Sitzgefälle – aktiviert die Muskulatur

Das geringe Gefälle des Sitzpolsters erleichtert auch ohne Motor das Aufstehen. Vor allem aber ist es weniger ermüdend, lange in einem Sessel mit geringem Gefälle zu sitzen: Die Muskulatur wird aktiviert und der Körper sackt nicht in sich zusammen.



Herz-Waage-Position / 0-Lage

Positionierung der Füße leicht erhöht über dem Becken. Dieser durch Pflegeexperten optimierte Winkel der Beinauflage macht den Unterschied. So entlasten Sie die Venen und das Herz sowie der Kreislauf werden geschont. Der Sessel lässt sich motorisch verstellen. Wie hier auf dem Bild gut ersichtlich, lassen sich die Armlehnen nach hinten verschieben. Somit sind diese immer in einer sehr angenehmen Position und entlasten die Schultern und geben zusätzliche Sicherheit.



Kopfteil höhenverstellbar und abnehmbar

Individuelle Unterstützungsfläche für grosse Persönlichkeiten: Das Kopfteil ist millimetergenau auf die Grösse der sitzenden Person anpassbar. Und dank des VARIANO Stecksystems kann es vollständig entfernt werden, wenn therapeutische und pflegerische Anwendungen einen ungehinderten Zugang zum Kopf und Nacken erfordern.



Armlehnen mit fest gepolstertem Kern

Eine Erkenntnis aus der aktivierend-therapeutischen Pflege: Die Armlehnen müssen Halt geben, dürfen aber nicht zu fest und glatt sein. Vielmehr ist eine weiche und anschmiegsame Unterstützungsfläche der Arme wichtig, um Irritationen der Haut und der Gefäße zu vermeiden. Beim Aufstehen oder Abstützen wiederum ist eine stabile und feste Unterstützungsfläche unerlässlich, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.



Armlehnen sind vielfach nutzbar

Das innovative Steckprinzip erlaubt ein Umstecken der Armlehnen. Die flachere, hintere Seite der Armlehnen lässt sich mühelos nach vorne umsetzen. So ist z.B. das „Unterfahren“ eines flacheren Tisches problemlos möglich. Damit die Armlehnen auch in der Herz-Waage-Position genügend Unterstützungsfläche bieten, können diese auch ganz einfach - dank dem innovativen Stecksystem - nach hinten verschoben werden.



Geschlossene Armlehnen

Die hochwertigen geschlossene Armlehnen bieten gegenüber einfachen offenen Lehnen mit Holz-Armauflagen viele Vorteile. Sie erleichtern die seitliche Positionierung und bieten durch den festen Kern mit der guten Polsterung eine optimale Armauflage. Holzarmlehnen können durch die Härte / Kanten gerade auch bei geschwächten Personen bei ungünstigen Bewegungen gegebenenfalls Stossstellen am Körper verursachen. Der geschlossene Sitzbereich bietet ferner einen „geschützten Raum“ was in einigen Krankheitsfällen wichtig ist. Nicht nur optisch, sondern auch real bieten diese Armlehnen mehr Stabilität.



Armlehnerhöhung

Set aus zwei Massivholzplatten als Distanzhalter für die Armlehnerhöhung. Option für Utensilientasche falls Kabel und Schläuche geführt werden müssen. Masse 8 x 6 cm.



Extra-lange Beinauflage

Der VARIANO-Sessel verfügt über die längste Beinauflage am Markt. Die Beine und Füße liegen auf, die Venen werden entlastet und die Beine können regenerieren.



Fussauflage ausklappbar

Sicheres und kräfteschonendes Positionieren der Füße. Beim Rollstuhl sind sie Standard, nicht aber bei rollbaren Pflegesesseln. Beim VARIANO sind dank des Fussteils die Beine und Füße optimal platziert, wenn die mobile Rollstuhlfunktion genutzt wird.



Fussteil auch in der Ruhe- und Liegeposition aufklappbar

Waden- oder Fusskrämpfe werden durch Dehnung der Unterschenkelmuskulatur gelindert. Diese Möglichkeit bietet das aufgeklappte Fussteil in der Ruhe- und Liegeposition. Die Füße können gegen den Widerstand des Fussteils gedrückt und somit die Muskulatur gedehnt werden. Damit die Beine optimal gepolstert liegen, braucht es jedoch ein zusätzliches Lordose- oder Keilkissen.



Mobilität durch Rollen

Nutzen Sie den VARIANO dort, wo er gebraucht wird. Kraftraubende Positionswechsel entfallen. Ob zu Tisch, an den Treppenlift, zum Bett oder im Bad, dank den Leichtlaufrollen kommen Sie überall hin. Die Rollen sind vorne feststehend, hinten beweglich, lenk- und bremsbar.



Schiebebügel

Ergonomisch geformt und aus massivem Buchenholz gefertigt. Der VARIANO lässt sich mithilfe des Schiebebügels mühelos bewegen und manövrieren.



Optimierte Masse

Es wurde an alles gedacht: Breite, Tiefe und die Höhe der Armlehnen. So passt der Pflegesessel in jeden Raum, durch fast jede Tür, unter den Tisch, dreht auf engstem Raum und ist sehr wendig. Auch in der XL-Version erhältlich, siehe unten.



Variano XL

Maximales Nutzungsgewicht/Personengewicht: 150kg; Beschlag hebt bis zu 200kg. Die Sitzbreite beträgt 70 cm und die Gesamtbreite 84 cm.



Leise, ruhige und vibrationsarme Motorik

Viele Krankheitsbilder gehen häufig mit Ängsten einher, daher ist der Einsatz von Technik notwendig, die Stabilität und Ruhe vermitteln. Die im VARIANO verbaute Technik ist stets auf dem neusten Stand und besonders einfach zu bedienen. Die motorische Verstellung mit Aufstehhilfe ist akkubetrieben und bewährt sich in Geriatrischen Kliniken, Onkologien, Tagespflegeeinrichtungen und in der privaten Pflege.



Innovatives Stecksystem

Das von Pflegeexperten bevorzugte Stecksystem erleichtert Pflegeanwendungen und Positionswechsel. Die Armlehnen und die Kopfstütze lassen sich unkompliziert und vollständig entfernen. Zusätzlich können die Armlehnen nach vorne oder hinten verschoben, sowie gedreht werden. Das Drehen der Armlehnen hat den grossen Vorteil, dass der Sessel auch ideal am Tisch einsetzbar ist. Beim VARIANO Stecksystem ist nichts im Weg, was den Bewegungsradius erhöht, es ist sehr robust und wartungsfrei.



Sitzkissen ist herausnehmbar, der Bezug abnehmbar

Hygienesitz; um den Sessel sinnvoll reinigen zu können, kann das Sitzkissen einfach entnommen werden. Der Bezug des Sitzkissens ist abnehmbar und lässt sich bei Bedarf erneuern. Ein Inkontinenzschutz (hochtechnische Membran) sorgt dafür, dass keine Flüssigkeiten in die Polsterung eindringen können. Zusätzlich ist die Sitzfläche mit einer **Anti-Dekubitus-Auflage** versehen, damit keine Druckstellen entstehen können.



Lordosekissen

Unterstützt die Wirbelsäule und vermeidet einen gekrümmten unteren Rücken, verbessert die Haltung und die Durchblutung. Flaches rechteckiges Kissen aus PE-Schaum.



Stützkissen 2er-Set

Das feste Kissen passt sich an die Sitzbreite der zu pflegenden Person an und dient der Stabilisierung der Rumpfmuskulatur. Einfach in der Benutzung und rutschfest.



Kopfstützkissen & Nackenkissen

Besserer Halt für den Kopf durch seitliche Kopfstützen und das angepasste Nackenkissen ist ein Komfortgewinn. Höhenverstellbar durch Stoffschlaufe und Gegengewicht. Leicht zu reinigen.



Ohrenbacken in zwei Grössen

Die Ohrenbacken ermöglichen einen besseren seitlichen Halt des Kopfes und ein Wegknicken wird so verhindert. Nicht nur optisch, sondern auch real bieten diese Ohrenbacken zusätzliche Stabilität. Die Ohrenbacken sind abnehmbar, um einen ungehinderten Zugang zur zu pflegenden Person zu gewährleisten.




Bezugsmaterialien sind zertifiziert

Die verarbeiteten Bezugsmaterialien sind für das Gesundheitswesen entwickelt und zertifiziert. Die hohen Anforderungen an die Hygiene im Krankenhausbetrieb sowie an den Brandschutz werden nachweislich erfüllt. Zudem sind die Bezugsmaterialien auf alle gängigen Desinfektionsmittel getestet.



Fernbedienung – leicht verständlich und intuitiv zu bedienen

Intuitive und einfache Bedienbarkeit sind in der Pflege wichtig. Betroffene sowie Pflegende verstehen die Funktionen intuitiv dank eindeutiger Symbole. Die drei ergonomisch geformten Tasten sind gut zu erfühlen und ermöglichen es, die Funktionen leicht zu bedienen.

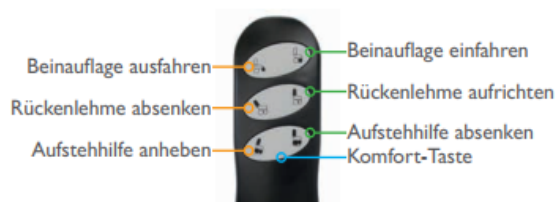

Die Fernbedienung kann rechts oder links vom Sessel unter die Armlehnen-Metall-Fixation angebracht werden. Dies ist besonders wichtig, wenn der Patient auf einer Seite eingeschränkt mobil ist.



Utensilientaschen in zwei Grössen

Schaffen Ordnung für vieles. Mit Klettverschluss zum Schliessen und einer Schlaufe zur Anbringung an Arm- oder Rückenlehne. Ideal z.B. als Kathetertasche. Netz im Boden und Teile an der Vorderfront zur Belüftung.

